

快速参考指南

Exigo H400

一天开始

触摸显示屏或接通分析仪电源。

- 依据之前关闭分析仪的方式，按**退出待机状态或通电**，以“唤醒”分析仪。

日常启动

如果日常启动序列被激活，系统将自动引导用户完成以下步骤。

1. 执行本底检查

- 在**开始菜单**中选择右上角的**本底**选项卡。
- 在所选模式下执行本底检查（详细说明请参阅用户手册第3节）。
- 结果应如下所示：

RBC	$\leq 0.03 (10^{12}/L)$
WBC	$\leq 0.2 (10^9/L)$
HGB	$\leq 0.2 (g/dL)$
PLT	$\leq 10 (10^9/L)$

- 本底检查通过后，继续执行最后步骤并分析质控品。

2. 执行质量控制检查

- 扫描质控品瓶的条码或选择**质控品**选项卡，然后选择所需质控品批号和水平旁边的圆圈。
- 按照质控品处理说明准备质控品。
- 在所选模式下抽吸质控品材料。
- 现在，分析仪将分析质控品样品。
- 对下一水平的质控品重复步骤 a-d。
- 当质控品结果可接受时，日常启动序列完成。

质控品审查/分析

1. 审查质控品运行和统计数据

- 请参阅用户手册第5节。

2. 审查质控品Levey-Jennings图

- 请参阅用户手册第5节。

患者样品运行

- 转至**开始菜单**以进入分析样品模式。
- 针对样品类型选择**血液**选项卡。
- 选择所需配置文件类型旁边的圆圈。
- 输入样品ID。
 - 如果使用条码阅读器，则扫描样品ID1和/或样品ID2。
 - 若要手动输入，则选择正确的字段并输入样品信息。
- 选择样品抽吸模式（见以下1-2）并分析样品。

1. 开管（OT）模式

- 将样本探针放入充分混匀的样品瓶内。
- 按**进样启动板**以分析样品。
- 在移除样品瓶时，请按照显示屏上的说明操作。

2. MPA（微量移液器接合器）模式

- 从仪器上移除MPA设备。
- 用新鲜的全血加满微量移液器。
- 小心擦除微量移液器外表面的多余血液。请勿触碰移液器的开口端。
- 将微量移液器插入MPA设备。
- 将MPA设备插入分析仪。样品循环将自动开始。

样品审查

如果有参数或系统通知消息生成，请参阅用户手册第9节。

一天结束

- 使用酒精擦拭片擦拭样品探针和探针冲洗杯。
- 如果需要，使用软布和去离子水清洁装置外部。

激活新的质控品批次

本程序输入新质控品批次的所有质控品检测值，这意味着每天在扫描并分析质控品瓶时系统将自动识别。

1. 转至**快速功能**，然后选择**输入检测**。
2. 按顺序扫描质控品检测表上的所有条码。
3. 输入所有条码后，屏幕将显示质控品条码已被正确输入和接受。
4. 选择**开始菜单**以返回样品分析模式。

更换试剂

在试剂液量不足且需要更换时，联锁试剂系统显示指示符和警告消息以提醒操作员。发生此情况时，请执行以下操作：

1. 转至**快速功能**，然后选择**添加试剂**。
2. 使用RFID阅读器扫描试剂容器上的RFID标签。
3. 输入所有RFID标签后，屏幕将显示试剂条码/标签已被接受。
4. 选择**开始菜单**以返回样品分析模式。
5. 取下新试剂容器的瓶盖和封口。
6. 将试剂液位传感器从已用的容器移至新的试剂容器。
7. 分析仪现在已准备好继续操作或分析样品。

预定维护

必需材料

	去离子水	吸水布/材料	Boule清洁 套装	个人防护装置	质控品
Boule清洗包程序	X	X	X	X	X

Boule清洗包程序进行年度清洗（~1小时和15分钟）

- a. 依次选择**主菜单**、**维护**、转入下一页的箭头，以进入**清洁菜单**。
- b. 依照Boule清洗包的说明，清洁分析仪。（Boule清洗包溶液随附有使用说明）。
- c. 执行本底检查，以确认所有值是否符合范围。请参阅用户手册第3节，以了解更多详情。