


什么是腹膜透析？

益宠生医



利用腹膜的半透膜性质(水和水溶性成分可通过,血球不通过),透过导管,把干净透析液灌入腹腔,将血中过高的尿素氮(BUN)等毒素透析出来。将液体自导管引流出来后,再灌入新的透析液,便能持续,温和而有效地降低毒素浓度,为急性肾伤害的动物争取肾脏复原的时间,或改善慢性肾衰竭等疾病的临床症状。

除了降低毒素浓度,若动物为无尿/寡尿期的急性肾伤害,选用高渗透压的透析液可将多余水分吸出,降低水脑,肺水肿的风险;若为多尿期,或是有脱水的情况,也可选用低渗透压的渗透液,搭配点滴维持水分恒定。

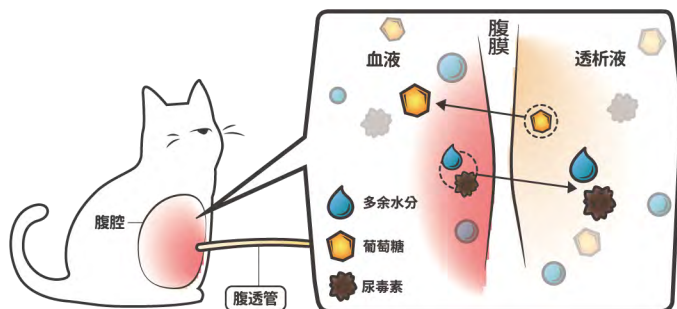

益宠的精神在于以更好,专为动物设计的器材,安全,优良成分的保健食品,药品,以及更便利的治疗,保护宠物的健康,和宠物共度快乐生活。



宠物用腹膜透析仪
兽医师的好帮手



北京中联动保科技有限责任公司

地址:北京市海淀区学院南路68号吉安大厦A-803


电话:010-56421996/62115080

网址:www.bjccac.com

www.benepet.com

宠物

腹膜透析仪

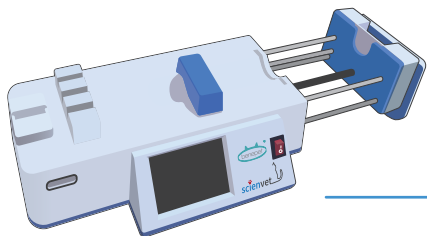

适用于

急性肾损伤
慢性肾衰竭
腹膜炎
急性胰腺炎

世界首创 宠物专用透析仪

只要简单设定，便可以自动进行连续腹膜透析。透析仪会自动侦测阻塞和逆流，仅需定时巡视，便可以在减少污染机率，省人力，降低透析造成宠物紧迫的情况下，有效率地执行腹膜透析，协助宠物早日恢复健康。



人性化操作介面

简单容易上手，另外也可调整注射/抽出速度，抽出程序采用「四阶段速度控制」。

贴近临床使用情境

符合兽医平时作业流程。

多国专利认证

品质以及安全通过认证。

什么原因会造成 急性肾损伤

造成原因

毒素



感染



阻塞



点滴加温器

专为腹透宠物设计，采用进口低压安全直流合金加热技术，均匀三面加热设置，受热温度非常精确，操作简便，专为宠物订制，一键操作，自动进入保温状态。需要使用时直接取出即可，阻燃保护材料，低压安全加热，为了毛小孩的健康而设计。



腹膜透析导管组



「水车」设计

可侦测体液之流向，降低阻塞或逆流情形。

条码启用设计

避免透析管路重复使用而导致感染疑虑。

管路三向分流设计

透析管路三向分流设计，减少交叉污染的风险。

透析液管路双头设计

可一次接两袋透析液，能有效率地进行自动连续腹膜透析。

透析管



特殊设计的腹透透析体内导管，可提高耐用度并降低感染风险。十字沟槽设计的内管不易阻塞，并可配合动物体形修剪。同时附有两个毡扣 (Dacron cuffs)，搭配正确手术方式，可减少渗漏机会。